

Pflegeanleitung

- **SEGUFIX®-Bandagengurte** (naturweiß) sind bis 95°C in der Waschmaschine waschbar. Niedrigere Temperaturen und Wäschenetze verlängern die Haltbarkeitsdauer des Produktes. Das Gurtmaterial ist nicht für Waschstraßen, Heißmangel und Trockenpressen geeignet (Beschädigung der Ösen möglich).
Gurte sind nicht vorgewaschen, bis zu 8% Schrumpfung möglich. Gurte immer trocken lagern.
Waschmittel: nicht aggressiv, keine Weichspüler, keine Bleiche.
Trockner: im Schongang bei niedriger Temperatur.
Desinfektion: chemothermisches Desinfektionswaschverfahren möglich (Ziffer 3.1.2 "Liste der vom Robert Koch-Institut geprüften und anerkannten Desinfektionsmittel und -verfahren").
Überdosierungen schädigen das Gurtmaterial.
- **SEGUFIX®-Transportgurte** (farbig) sind bis zu 30°C in der Waschmaschine waschbar. Das Gurtmaterial ist nicht für Waschstraßen, Heißmangel und Trockenpressen geeignet (Beschädigung der Ösen möglich). Gurte immer trocken lagern.
Waschmittel: nicht aggressiv, keine Weichspüler, keine Bleiche.
Trockner: im Schongang bei niedriger Temperatur.
- **SEGUFIX®-Schlösser und Sockel** vor der Reinigung (Waschvorgang) entfernen. Mitgewaschene Schlösser funktionieren nicht mehr oder nicht mehr zuverlässig. Verschmutzte Schlösser mit einem feuchten Tuch reinigen, keinesfalls in Flüssigkeit tauchen.
- **SEGUFIX®-Klettverschlüsse** sollten vor dem Waschen und Trocknen im Wäschetrockner geschlossen werden, damit der Klettverschluss nicht verflust. Klettverschlüsse von Zeit zu Zeit mit harter Bürste von Flusen und Ähnlichem befreien. Auch bei normalem Gebrauch verflusen die Klettverschlüsse nach einiger Zeit. Dies kann die Haltekraft verringern. Vor jedem Gebrauch Haltekraft überprüfen.
- Die **Haltbarkeitsdauer** hängt ab von der Intensität der Nutzung und wird durch sanfte Reinigungsverfahren (Reinigungsmittel/Wäschenetz) verlängert.
- **SEGUFIX®-Schaffelle**:
Waschmaschine: Waschttemperatur 30 - 40°C, nicht schleudern, Wollwaschmittel verwenden.
Handwäsche: in handwarmem Wasser (30 - 40°C) mit Wollwaschmittel zügig durchwaschen, in klarem, handwarmem Wasser durchspülen und ausschleudern.
Trocknen der Schaffelle: zum Trocknen in den Wäschetrockner oder einfach an einer luftigen Stelle aufhängen. Vorsicht: Nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen!
Bevor das Fell vollständig trocken ist, dieses etwas in Form ziehen und wenn nötig, das Fell mit einer Stahlbürste leicht durchbürsten.
Hinweis: Bitte unbedingt beachten, dass das Fell nicht zu lange im Wasser ist (nicht einweichen).

Abkürzungen zu den verschiedenen Ausführungen

Ausführung f - Flausch

- Für empfindliche Haut
- Hautfreundliche Polsterung
- Angenehm und weich
- 100 % reine Baumwolle

Ausführung r - robust

- Verstärkte Ösengurte für hohe Beanspruchung

Ausführung e - extra lange Betthalterung

- Ab einer Bettbreite von über 1 m, Betthalterungen auf jeder Seite ca. 20 cm länger

Ausführung v - Velcro® / Klettverschluss / Metallschlaufenverschluss

- Lagerungshilfe
- Keine Fixierung*

*Hinweis: Aus juristischer Sicht gelten Produkte mit Klettverschluss als Fixierung, wenn der Patient sich nicht selbständig befreien kann.